



FreeStyle

Libre 2



Rimanga ben informato
per assumere
il controllo

I dati dell'insulina ottenuti dalla penna
Smart Insulin¹ possono essere trasferiti
all'app² FreeStyle LibreLink con una
semplice scansione.

Questo è progresso.

Abbott

L'aiuto nella gestione del diabete con il sistema di misurazione FreeStyle Libre 2



Con una semplice scansione può trasferire automaticamente i dati dell'insulina dalla penna Smart Insulin all'app FreeStyle LibreLink^{1,2}.



Con l'app FreeStyle LibreLink può tenere sempre sotto controllo le dosi di insulina somministrate e i relativi effetti sui valori del glucosio.



Grazie a semplici report sui valori del glucosio e sulle dosi di insulina somministrate, potrà prendere insieme al Suo team di diabetologi decisioni terapeutiche mirate e ottimali.⁶

Ora può visualizzare i Suoi dati del glucosio e dell'insulina direttamente nell'app senza effettuare registrazioni manuali



Collegare

Può scansionare e registrare una NovoPen® 6 o NovoPen Echo® Plus per trasferire automaticamente le dosi di insulina registrate nell'app FreeStyle LibreLink. La posizione corretta per il trasferimento dei dati con tecnologia NFC* può variare in funzione del modello di smartphone.

* L'abbreviazione NFC sta per Near Field Communication (in italiano: comunicazione a corto raggio), una tecnica a radiofrequenza per trasmettere i dati a breve distanza, al massimo quattro centimetri. La NFC stabilisce la connessione tra il sensore e lo smartphone e/o il lettore.



Verificare

Può tenere sempre sotto controllo le dosi di insulina somministrate e i relativi effetti sui valori del glucosio.



Condividere

La condivisione^{3,6} dei report sulle dosi di insulina somministrate e sui valori del glucosio aiuta Lei e il Suo specialista a prendere decisioni terapeutiche fondate.

App FreeStyle LibreLink – può essere scaricata gratuitamente e utilizzata subito

1 Verificare la compatibilità

L'app FreeStyle LibreLink è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di scaricare l'app, verifichi che il Suo smartphone sia compatibile. L'elenco di compatibilità è disponibile nel sito www.FreeStyle.Abbott oppure scansionando direttamente questo codice QR:



2 Scaricare l'app gratuitamente

Cercare nell'**App Store** (iPhone)



- Aprire l'Apple App Store
- Selezionare «Cerca» in basso a destra
- Inserire «FreeStyle LibreLink» nella casella di ricerca e cliccare su «Cerca»
- Scorrere fino all'app FreeStyle LibreLink e cliccare su «Scarica»

o in **Google Play** (smartphone Android)



- Aprire Google Play
- Inserire «FreeStyle LibreLink» nella casella di ricerca e cliccare sulla lente d'ingrandimento
- Scorrere fino a FreeStyle LibreLink e selezionare l'app
- Cliccare su «Installa» nella vista dettagliata dell'app

3 Scaricare e aprire l'app.




4 Seguire i passi visualizzati sullo smartphone² per la registrazione.

5 **Avviare con una scansione il sensore**, precedentemente applicato sulla parte posteriore superiore del braccio. A tal fine, tenere lo smartphone sopra il sensore ad una distanza massima di 4 cm.

6 Il Suo smartphone indica una scansione riuscita; il Suo sensore è ora avviato. **Dopo 60 minuti** si possono leggere i primi valori di glucosio con una scansione.


Collegamento di una NovoPen® con l'app FreeStyle LibreLink

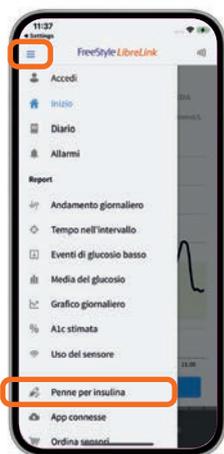

- 1 Aprire il «menu» e selezionare «Penne per insulina».



- 2 Selezionare «Inizia».

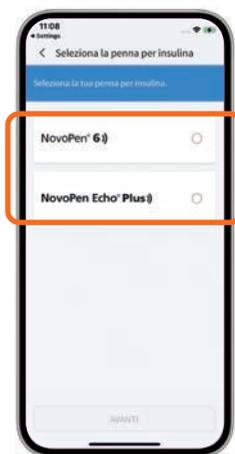

- 3 Selezionare la «penna per insulina» e toccare «Avanti».

Nota: il collegamento con la NovoPen® 6 e la NovoPen Echo® Plus si basa sulla tecnologia NFC (Near Field Communication); ciò significa che:

- la penna Smart Insulin¹ e lo smartphone² devono essere tenuti **vicini l'una all'altro** (0–2 cm di distanza) per avviare il trasferimento dei dati.
- lo smartphone e la penna Smart Insulin devono rimanere vicini **abbastanza a lungo** (3-10 secondi) per completare il trasferimento dei dati.



- 4 Scansionare la NovoPen® toccando «Scansiona NovoPen».



- 5 Verificare se la penna per insulina è stata aggiunta e toccare «Avanti».

Adattamento delle impostazioni del dispositivo nell'app FreeStyle LibreLink




- 6 Selezionare il «colore della penna per insulina» e toccare «Avanti».



- 7 Selezionare il «tipo di insulina» contenuta in questa penna e toccare «Avanti».



- 8 Selezionare «l'insulina» contenuta in questa penna e toccare «Avanti».

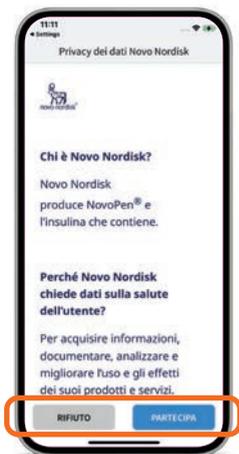

- 9 Toccare «**Accenso**» o «Rifuto» per acconsentire o opporsi al trasferimento dei dati a Novo Nordisk.

Nota: l'opzione del consenso alla privacy non viene visualizzata se l'utente è minorenne oppure se l'app viene utilizzata senza account utente.



- 10 Verificare che la configurazione sia stata completata e toccare «**Fine**».

Semplice creazione della connessione con smartphone Android e iPhone



Trasferimento dei dati dalla penna Smart Insulin¹ allo smartphone Android in un solo passaggio:



- 1 Tenere la NovoPen[®] vicina e ferma sul **lato posteriore** dello smartphone Android².

Per trovare la posizione corretta sullo smartphone, provare a scansionare in diverse zone.



Trasferimento dei dati dalla penna Smart Insulin all'iPhone in due passaggi:




- 1 Toccare il pulsante «**Scansiona**». 


- 2 Tenere la NovoPen[®] vicina e ferma sulla **parte superiore** dello smartphone.

Nota: ad avvenuta scansione della NovoPen[®], lo smartphone emette un segnale acustico (solo se la funzione acustica è attivata) e una vibrazione. Una volta trasferiti i dati, il numero delle nuove dosi registrate e il tipo di insulina vengono visualizzati nell'app² FreeStyle LibreLink.

Visualizzazione delle dosi e del tipo di insulina registrati nell'app FreeStyle LibreLink

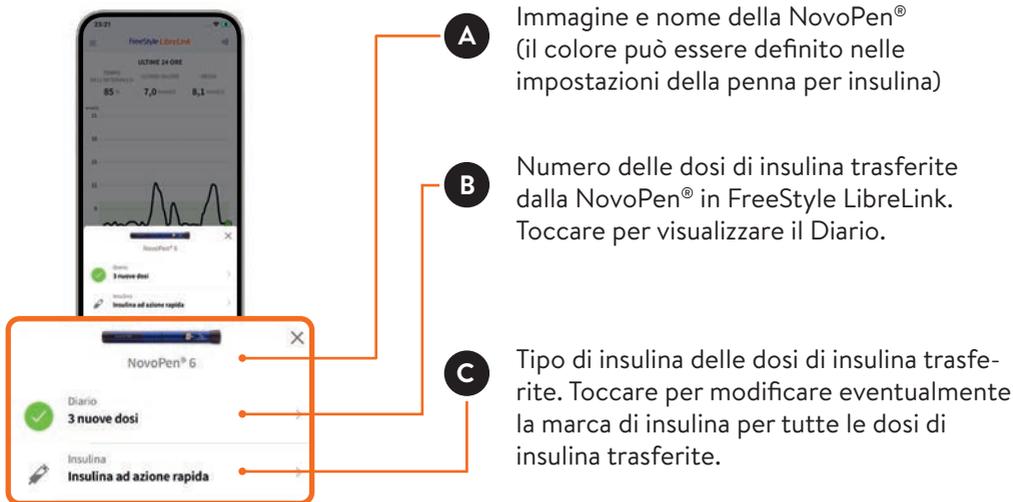

Visualizzazione e modifica delle dosi di insulina nella schermata iniziale o nel Diario

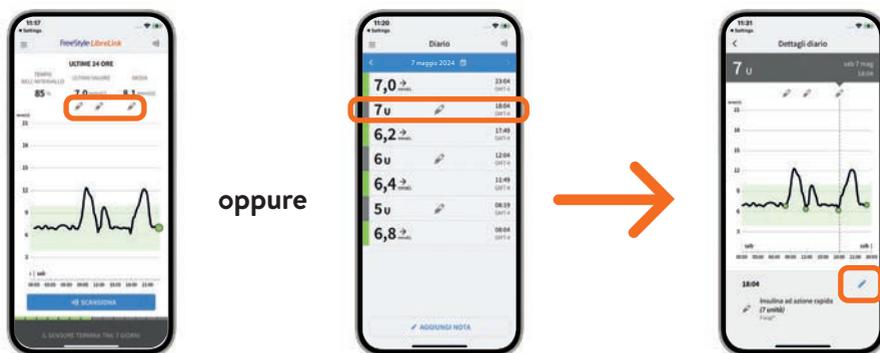

Nella schermata iniziale toccare i **simboli**  per visualizzare e modificare nuove note sull'insulina.

Toccare le singole dosi di insulina per visualizzarne o modificarne i dettagli.

Toccare il **simbolo della matita blu**  per modificare i dettagli relativi alla dose di insulina.

Modifica delle note sull'insulina e marcatura delle dosi di insulina come «Flusso controllare»

1 Schermata «Modifica nota»

- ✔ Modificare una dose terapeutica in «Flusso controllare» effettuando la selezione nel menu a tendina.
- ✔ Modificare la marca di insulina effettuando la selezione nel menu a tendina.
- ✔ Modificare le note esistenti o aggiungerne delle nuove.



2 Schermata dopo aver modificato una dose di insulina in «Flusso controllare».


Modifica del nome della penna per insulina



Richiamare le impostazioni della penna Smart Insulin¹ e toccare **«Nome»**.



Toccare **«Nuovo nome»** e inserire il nuovo nome per la penna Smart Insulin. Infine, toccare **«Salva»**.

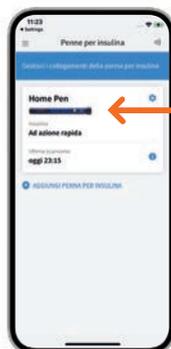


Il nuovo nome viene visualizzato nell'app FreeStyle LibreLink.

In questo esempio, il nome della penna Smart Insulin è stato modificato in «Home Pen».

Più «Tempo nel range target» significa un valore dell'HbA1c¹¹ più basso

L'app² FreeStyle LibreLink calcola automaticamente il «Tempo nel range target». Il report «Tempo nel range target» mostra la percentuale di tempo in cui i valori del glucosio sono stati **al di sopra, al di sotto o entro il range target**.

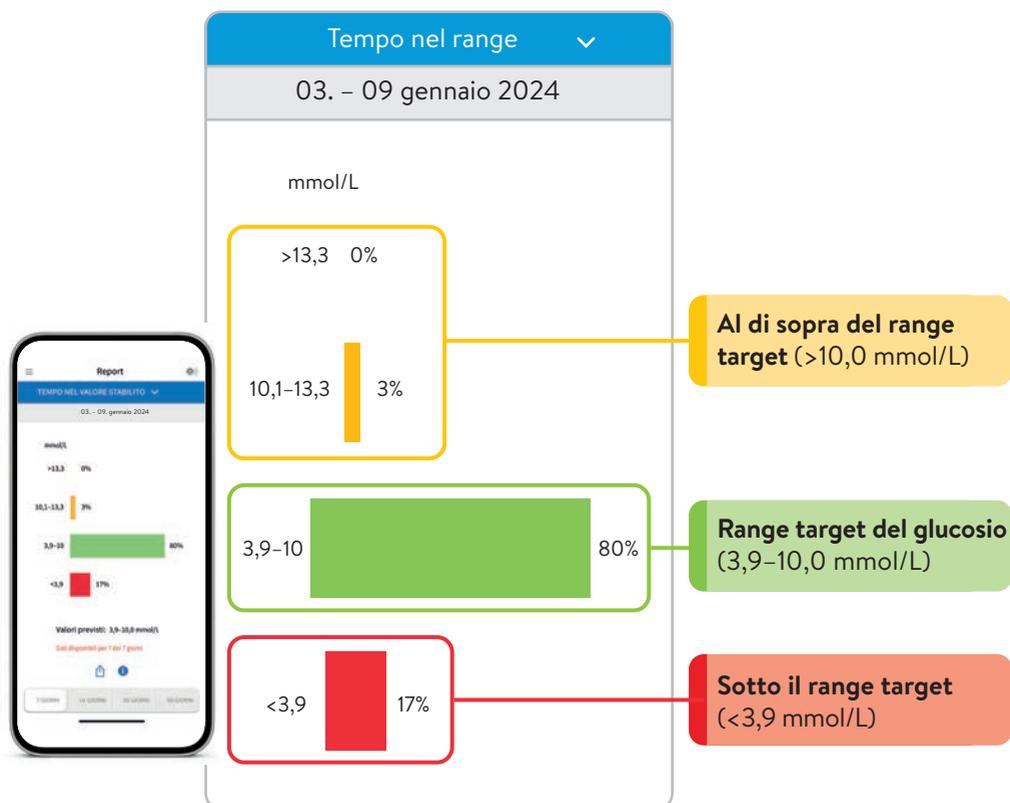


Consulti il Suo team di diabetologia per sapere come impostare il Suo range target. Può annotare i valori del Suo range target nell'ultima pagina.

LibreView: Report «Riepilogo settimanale»

Rappresentazione chiara dei dati dell'insulina e del glucosio:

- ✓ I dati relativi all'insulina ad azione rapida o ad azione lenta e i dati del glucosio sono codificati per colore e sono visualizzati affiancati.
- ✓ Questa rappresentazione aiuta Lei e il Suo team di diabetologi a prendere decisioni terapeutiche mirate.

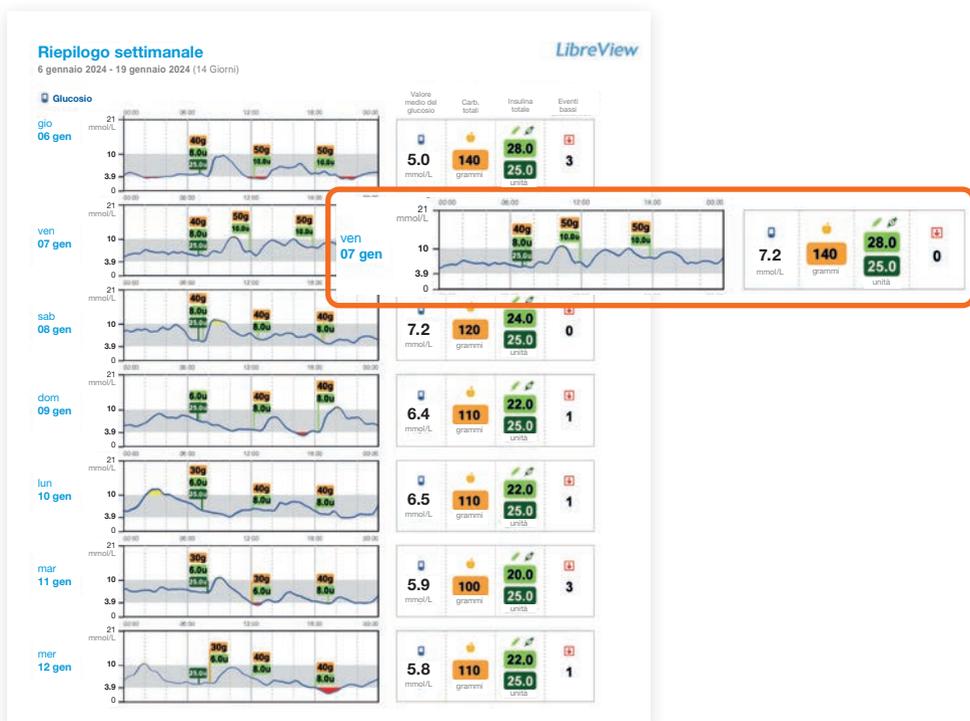

I dati dell'insulina registrati nella NovoPen® possono essere consultati in LibreView³⁻⁶ nelle seguenti rubriche:

- Istantanea
- Riepilogo settimanale
- Diario giornaliero
- Profilo dei pasti
- Dettagli del dispositivo

LibreView: Report «Istantanea»

Insulina giornaliera totale media (somma dell'insulina ad azione rapida e dell'insulina ad azione lenta) a colpo d'occhio



Chiara panoramica del consumo medio giornaliero di insulina in un arco di tempo di 14 giorni.



Per ulteriori informazioni sui report e per creare gratuitamente un account consultare www.LibreView.com.



FreeStyle Libre – l'ecosistema digitale per la gestione del diabete



Tenga tutto sotto controllo:

con una scansione può trasferire automaticamente i dati dell'insulina dalla penna Smart Insulin¹ compatibile nell'app² FreeStyle LibreLink.



Condivida i dati del glucosio con il Suo team di diabetologia⁶:

per prendere decisioni terapeutiche fondate alla prossima visita.



Condivida i dati del glucosio con i familiari:

faccia sapere loro che sta bene.^{6,10}



Scarichi subito l'app
FreeStyle LibreLink!



1. L'app FreeStyle LibreLink funziona con i sensori FreeStyle Libre 2 Plus ed è compatibile esclusivamente con NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus. 2. Le app del sistema FreeStyle Libre sono compatibili solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare le app, consultare il sito web www.FreeStyle.Abbott per verificare la compatibilità del dispositivo. 3. L'utilizzo di FreeStyle LibreLink richiede la registrazione a LibreView. 4. Il sito web LibreView è compatibile solo con determinati sistemi operativi e browser. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.LibreView.com. 5. LibreView è un'applicazione basata su cloud. I dati LibreView vengono trasmessi su una rete virtuale non pubblica e conservati in una banca dati su server SQL. I dati sono crittografati a livello dei file. La crittografia e il tipo di funzioni dell'archivio chiavi evitano che il provider dell'host nel cloud (Amazon Web Services) possa visualizzare i dati. L'utilizzo di LibreView in Svizzera prevede l'hosting dei dati su server della UE. L'accesso a qualsiasi account utente è protetto da password. 6. Il trasferimento di dati tra le app del sistema FreeStyle Libre richiede una connessione Internet. 7. L'app LibreLinkUp è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l'app, consultare il sito web www.LibreLinkUp.com. 8. La condivisione dei dati all'interno delle app del sistema FreeStyle Libre richiede la registrazione a LibreView. 9. È possibile accettare l'invito di LibreLinkUp e ricevere o rifiutare notifiche e avvisi. Si raccomanda di decidere in merito sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze per poter reagire in modo adeguato in caso si ricevano valori del glucosio troppo alti o troppo bassi. 10. L'utilizzo di LibreLinkUp richiede la registrazione a LibreView. 11. Yaron Marianna, et al., Diabetes Care. 2019;42(7):1178-1184. 28 12. Per un profilo glicemico completo, si deve sostituire il sensore FreeStyle Libre 2 Plus ogni 15 giorni ed eseguire una scansione quando si verifica una perdita di segnale. 13. Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati.

Ha domande? Saremo lieti di fornirLe assistenza!

Numero del servizio clienti
per tutte le domande relative ai sistemi FreeStyle Libre:



0800 804 404* (numero verde)

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle 17:00.

Numero del servizio clienti
per le nostre applicazioni digitali (app² e LibreView³⁻⁶):



0800 102 102* (numero verde)

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00.

* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando i numeri 0800 804 404 e 0800 102 102 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Servizio gratuito dalla rete fissa e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.



Ulteriori informazioni sono
disponibili all'indirizzo
www.FreeStyle.Abbott



Le immagini sono foto di agenzia scattate con modelli. I dati del glucosio hanno scopo illustrativo e non sono dati reali di pazienti.

L'involucro del sensore, FreeStyle Libre, e i marchi correlati sono marchi di Abbott. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. NovoPen[®] 6 e NovoPen Echo[®] Plus sono marchi registrati di Novo Nordisk A/S.

I sistemi di misurazione FreeStyle Libre sono certificati per bambini dai 2 anni in su e adulti, comprese le donne incinte. La supervisione dell'uso e la valutazione dei sistemi di misurazione FreeStyle Libre nei bambini fino ai 12 anni sono responsabilità di un adulto.