

Découverte du système FreeStyle Libre Select



Référence : 72234-01





Référence : 78802-01



Téléchargez le guide de démarrage rapide ou le manuel d'utilisation sur : <https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/fr.html>

ou scannez le QR code

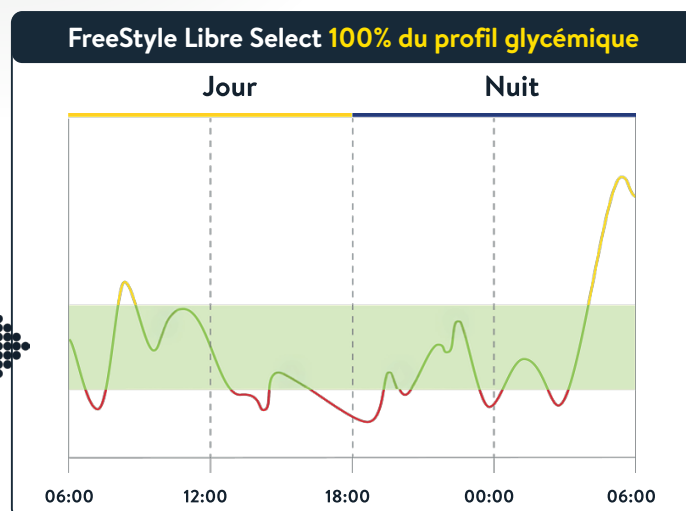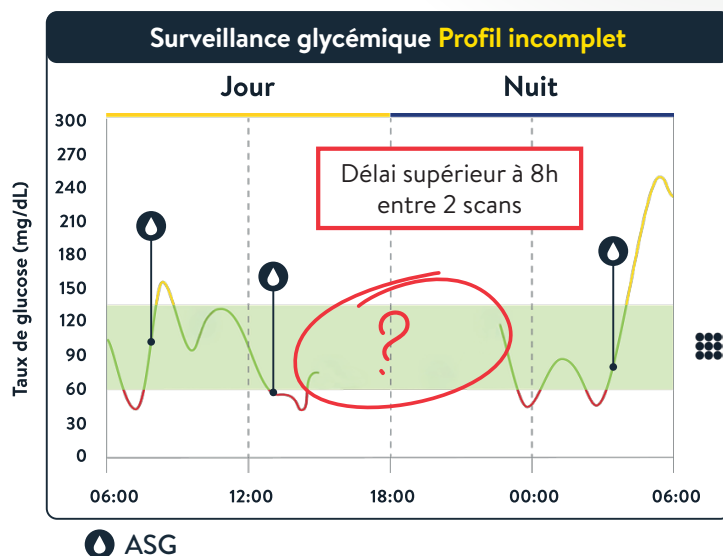

Résultats précis et fiables pendant 15 jours¹



Affichage automatique du taux de glucose sur téléphone avec l'application FreeStyle Libre 3 ou lecteur FreeStyle Libre 3¹



Lecteur² 3 en 1 avec mesure du glucose, de la glycémie et de la cétonémie



15 jours de mémoire avec 100% des données enregistrées automatiquement pour un profil glycémique complet¹

FreeStyle
Libre SELECT


Abbott

* En comparaison de la réalisation d'un test par glycémie capillaire. 1. Manuel d'utilisation de FreeStyle Libre Select. 2. Manuel d'utilisation du lecteur FreeStyle Libre 3. Document de bon usage du système FreeStyle Libre Select, à destination des professionnels de santé. Veuillez également vous reporter aux manuels d'utilisation du système FreeStyle Libre Select.

Contrairement à un lecteur de glycémie classique, le système FreeStyle Libre Select mesure le glucose dans le liquide interstitiel

Le capteur FreeStyle Libre Select :
mesure le glucose dans le **liquide interstitiel**

Le microfilament souple de 0,4mm d'épaisseur est inséré juste sous la peau sur une profondeur de 5mm.

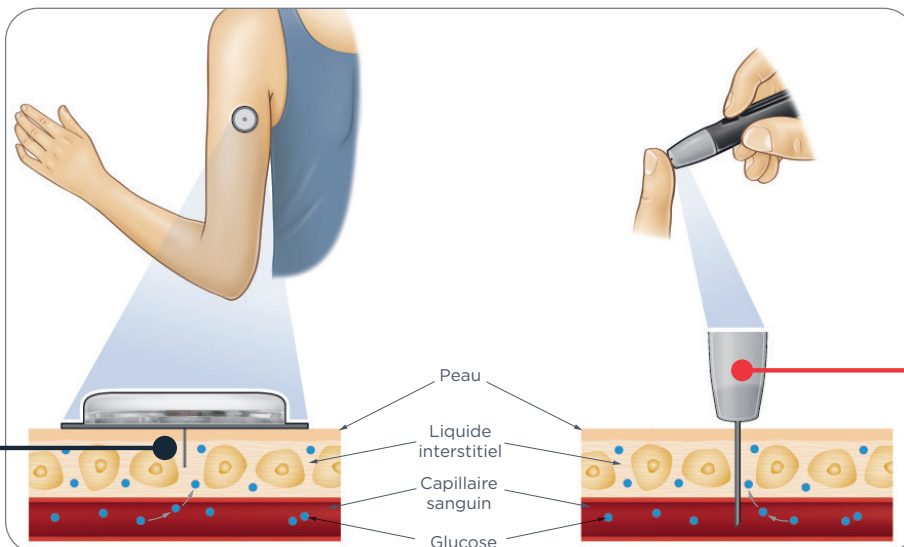


Le lecteur de glycémie capillaire classique :
mesure le glucose dans le **sang**

Autopiqueur

Le glucose se diffuse physiologiquement du réseau capillaire vers le liquide interstitiel. Ce qui peut expliquer un léger décalage de 2 à 7 minutes entre le taux du glucose mesuré dans le liquide interstitiel et la glycémie capillaire*.


Quand le taux de glucose diminue,

le taux de glucose va d'abord diminuer dans le sang avant de diminuer dans le liquide interstitiel. Ce qui peut engendrer un décalage temporel des valeurs : le résultat obtenu par la mesure en continu du glucose pourrait être plus haut que celui obtenu avec un lecteur de glycémie classique.

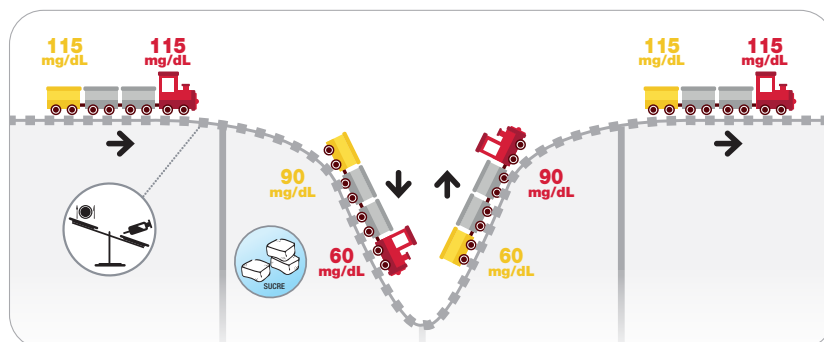

Quand le taux de glucose augmente,

le taux de glucose va d'abord augmenter dans le sang avant d'augmenter dans le liquide interstitiel. Ce qui peut engendrer un décalage temporel des valeurs : le résultat obtenu par la mesure en continu du glucose pourrait être plus bas que celui obtenu avec un lecteur de glycémie classique.


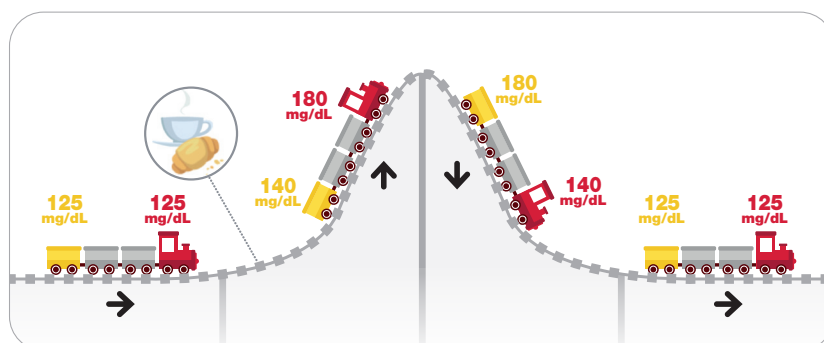


— Évolution du taux de glucose

FreeStyle Libre Select (liquide interstitiel)

Lecteur de glycémie classique (sang)

FreeStyle Libre Select, pour un suivi complet de l'équilibre glycémique avec le lecteur ou l'application^{*1,2}

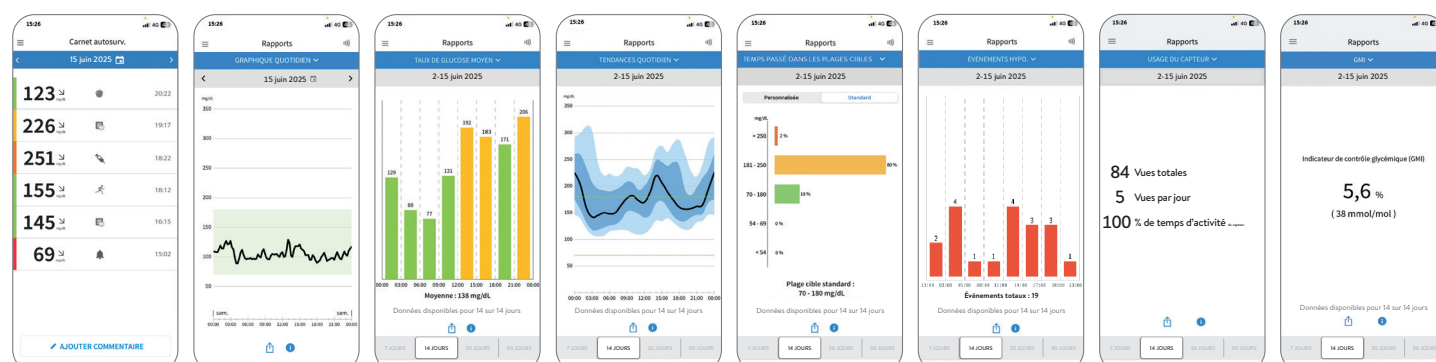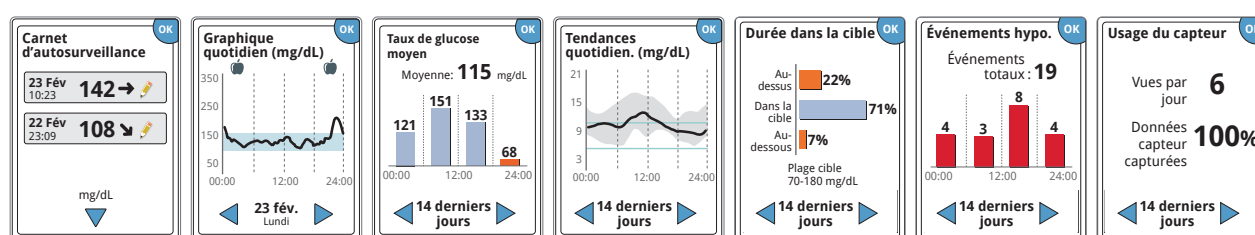


* En comparaison des autres lecteurs et applications de glycémie disponibles à date en France. **1.** Manuel d'utilisation du lecteur FreeStyle Libre 3. **2.** Manuel d'utilisation de l'application FreeStyle Libre 3.

Données fictives à des fins d'illustration uniquement. Il ne s'agit ni de vrais patients, ni de vraies données.

LibreView¹, la plateforme de référence pour un suivi facilité des patients équipés de FreeStyle Libre²⁻³

Accédez à des rapport standardisés pour une analyse complète du profil glycémique de vos patients

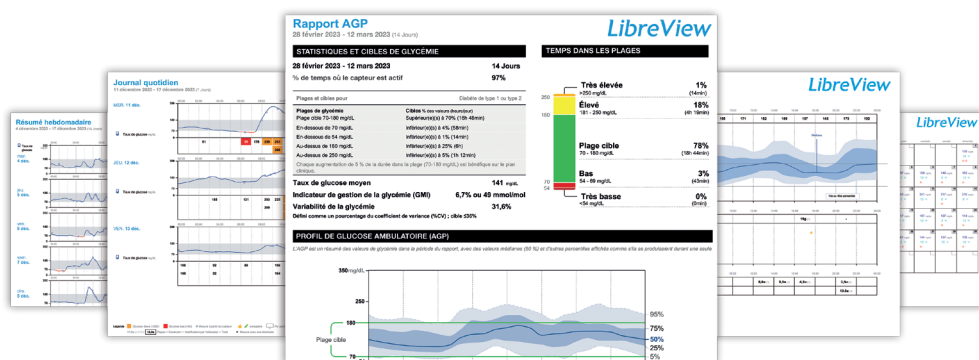

- ✓ Profil glycémique ambulatorio (AGP : Ambulatory Glucose Profile)
- ✓ Image instantanée
- ✓ Apperçu de la tendance du taux de glucose
- ✓ Tendances quotidiennes
- ✓ Résumé hebdomadaire
- ✓ Journal quotidien
- ✓ Tendances de repas
- ✓ Résumé mensuel
- ✓ Détails de l'appareil

Les données de vos patients sont automatiquement envoyées sur LibreView¹ depuis leur application FreeStyle Libre 3². Connectez le lecteur FreeStyle Libre 3³ à l'ordinateur à l'aide du câble jaune fourni, puis transférez les données vers LibreView.



Pour le recyclage des capteurs usagés FreeStyle Libre, vous pouvez commander gratuitement des enveloppes pré-affranchies en adressant votre demande à EasyToCollect@abbott.com

Pour toutes questions notre Service Clients est à votre disposition.



0 800 10 11 56 Service & appel gratuits

Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 (appel gratuit à partir d'un poste fixe) ou 01 45 60 34 34 (appel de l'étranger, DROM-COM ou autre opérateur)



pro.FreeStyle.abbott
> Service Clients
> Contactez-nous

FreeStyle
Libre SELECT

Abbott

1. Manuel d'utilisation de Libre View. 2. Manuel d'utilisation de l'application FreeStyle Libre 3. 3. Manuel d'utilisation du lecteur FreeStyle Libre 3. Données fictives à des fins d'illustration uniquement. Il ne s'agit ni de vrais patients, ni de vraies données. Veuillez également vous reporter aux manuels d'utilisation du système FreeStyle Libre Select. © 2026 Abbott. Tous droits réservés. Libre, le logo du papillon, la forme et l'apparence du capteur, la couleur jaune, et les marques et/ou designs associés sont la propriété intellectuelle du groupe de sociétés Abbott dans différents territoires. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. INSTIT-ADC-114285-V2-02/26. Abbott France S.A.S. 40/48 rue d'Arcueil - CP 10457 94593 Rungis Cedex France. 602 950 206 RCS Créteil.