


Utilisation du système FreeStyle Libre Select



GUIDE D'APPLICATION DU CAPTEUR*

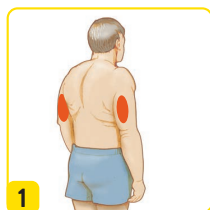

EMPLACEMENT POUR LA ZONE DE POSE DU CAPTEUR

- Choisissez une zone à l'arrière du haut du bras.
- N'utilisez pas de produits hydratants, de lotions ou de crèmes au niveau de la zone de pose du capteur.
- Évitez de poser le capteur sur des grains de beauté, zones cicatrisées ou tatouées.
- Épilez si besoin la zone car les poils peuvent se glisser entre le capteur adhésif et la peau.



PRÉPARATION DE LA PEAU



1. Laver

Lavez le site avec du savon ordinaire (non hydratant et non parfumé), rincez et laissez sécher.




2. Nettoyer

Nettoyez la peau avec une lingette imbibée d'alcool.




3. Sécher

Laissez la peau sécher complètement avant d'appliquer le capteur.

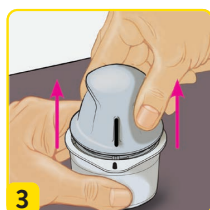


PRÉPARATION DU CAPTEUR

- Retirer complètement l'opercule du capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur.
- Alignez le trait noir de l'applicateur de capteur avec celui du pack du capteur.
- Pressez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne le point d'arrêt (vous entendrez un « clic »).
- Retirer l'applicateur de son pack. L'applicateur est maintenant prêt à être posé.

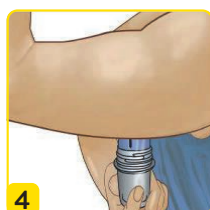

APPLICATION DU CAPTEUR

- Placez l'applicateur au-dessus de la zone nettoyée. Poussez fermement pour appliquer le capteur.
- Retirez doucement l'applicateur de la peau.
- Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Lissez son contour pour augmenter l'adhésion.

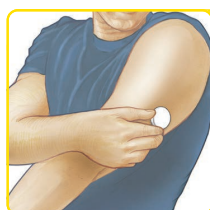

CONSEILS UTILES POUR AMÉLIORER L'ADHÉSION DU CAPTEUR

Il existe des produits comme des lingettes ou liquides, qui protègent la peau et améliorent l'adhésion du capteur. Des bandes adhésives peuvent également être utilisées. Elles doivent être appliquées au moment de l'application du capteur et au-dessus de celui-ci.

L'orifice au centre du capteur **ne doit pas être recouvert**.

DÉMARRAGE DU CAPTEUR FREESTYLE LIBRE SELECT



Pour démarrer le capteur FreeStyle Libre Select, vous devez le scanner avec le lecteur FreeStyle Libre 3 ou un téléphone muni de l'application FreeStyle Libre 3.

Sur le lecteur FreeStyle Libre 3 ou l'application FreeStyle Libre 3 appuyez sur « **Scanner nouveau capteur** ».




Au bout de **60 minutes**, le capteur FreeStyle Libre Select peut être utilisé pour vérifier le taux de glucose.

Si vous démarrez le capteur FreeStyle Libre Select avec l'application FreeStyle Libre 3, vous ne pourrez plus l'utiliser avec le lecteur FreeStyle Libre 3.

Inversement, si vous démarrez le capteur FreeStyle Libre Select avec le lecteur FreeStyle Libre 3, vous ne pourrez plus l'utiliser avec l'application FreeStyle Libre 3.

COMMENT SCANNER LE CAPTEUR FREESTYLE LIBRE SELECT ?

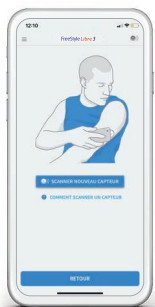

Scannez avec un téléphone muni de l'application FreeStyle Libre 3



Avec un iPhone :
L'écran doit être face au capteur et la partie haute du téléphone contre le capteur.



Avec les autres types de smartphones :
L'écran doit être vers l'extérieur, et la partie centrale du téléphone contre le capteur.



Scannez avec le lecteur FreeStyle Libre 3



Approchez le lecteur FreeStyle Libre 3 du capteur FreeStyle Libre Select.


Les valeurs s'affichent automatiquement toutes les minutes sur le téléphone muni de l'application FreeStyle Libre 3 ou sur le lecteur FreeStyle Libre 3

COMMENT ACTIVER LES ALARMES OPTIONNELLES DE FREESTYLE LIBRE SELECT ?

Pour activer les alarmes optionnelles avec l'application FreeStyle Libre 3 ou avec le lecteur FreeStyle libre 3, suivez les étapes ci-dessous :
exemple d'une alarme de glucose bas




Appuyez sur « Alarmes » dans le menu.

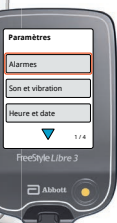

Appuyez sur « Alarme glucose bas ».




Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme.
Puis réglez le seuil d'alarme.

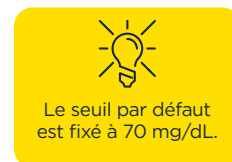

RETRAIT DU CAPTEUR

Le capteur est conçu pour tenir 15 jours. Après ce délai, pour retirer le capteur, il vous suffira de tirer sur le bord adhésif qui maintient le capteur fixé à la peau et le décoller lentement.
Pour éviter les irritations de la peau, changez régulièrement de site de pose du capteur.

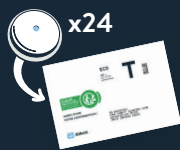

Pour le recyclage des capteurs usagés FreeStyle Libre, vous pouvez commander gratuitement des enveloppes pré-affranchies en adressant votre demande à EasyToCollect@abbott.com

Pour toutes questions notre Service Clients est à votre disposition.



0 800 10 11 56

Service & appel gratuits

Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 (appel gratuit à partir d'un poste fixe) ou 01 45 60 34 34 (appel de l'étranger, DROM-COM ou autre opérateur)



pro.FreeStyle.abbott > Service Clients > Contactez-nous

FreeStyle
Libre SELECT

Abbott

Veillez également vous reporter aux manuels d'utilisation du système FreeStyle Libre Select. © 2026 Abbott. Tous droits réservés. Libre, le logo du papillon, la forme et l'apparence du capteur, la couleur jaune, et les marques et/ou designs associés sont la propriété intellectuelle du groupe de sociétés Abbott dans différents territoires. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. INSTIT-ADC-114286-V2-02/26.
Abbott France S.A.S. 40/48 rue d'Arcueil - CP 10457 94593 Rungis Cedex France. 602 950 206 RCS Créteil.