


FreeStyle Libre 3
connecté à
mylife CamAPS FX¹

**Guide de compatibilité
téléphones et systèmes
d'exploitation²**

**Capteur
FreeStyle Libre 3**



**Application
mylife CamAPS FX**

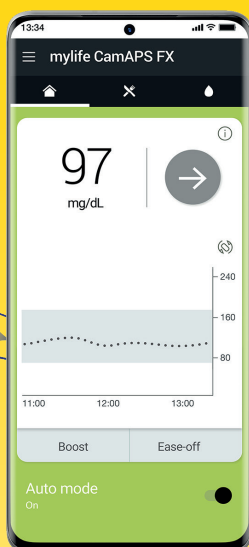

mylife YpsoPump

1. JORF n°0029 du 4 février 2025.

2. Guide de compatibilité des téléphones et des systèmes d'exploitation avec FreeStyle Libre 3.

Document promotionnel à destination des professionnels de santé.

Images et données utilisées uniquement à des fins d'illustration. Il ne s'agit ni de vrais patients, ni de vraies données.



life. to the fullest.®

Abbott


FreeStyle Libre 3, le capteur le plus petit, fin et discret*, connecté à mylife CamAPS FX**,1-3



Capteur
FreeStyle Libre 3



Application
mylife CamAPS FX

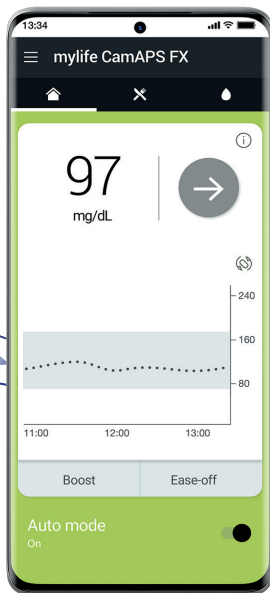


mylife YpsoPump

Remboursé - Indications retenues :

Patients diabétiques de type 1, adultes et enfants âgés d'au moins 4 ans, dont l'objectif glycémique n'est pas atteint en dépit d'une insulinothérapie intensive bien conduite (dose quotidienne totale d'insuline ≥ 8 unités par jour) par perfusion sous-cutanée continue d'insuline (pompe externe) et d'une autosurveillance glycémique pluriquotidienne ($\geq 4/j$).

Absence de critère restrictif lié à l'HbA1c et de la nécessité d'une durée préalable de 6 mois d'usage de pompe.

* En comparaison des capteurs de mesure en continu du glucose disponibles et pris en charge en France en date d'édition de ce document. ** L'usage de l'application mylife CamAPS FX nécessite de disposer d'un lecteur de glycémie : lorsque les symptômes ne correspondent pas aux résultats du capteur, ou lorsque le patient suspecte que le résultat pourrait être inexact, la réalisation d'un test par prélèvement au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire. 1. Manuel d'utilisation FreeStyle Libre 3. 2. Avis de la HAS 03 octobre 2023. 3. JORF n°0029 du 4 février 2025.

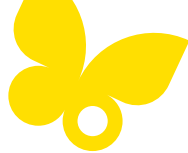

FreeStyle Libre 3, Une connectivité inégalée¹⁻³



10 mètres de portée grâce à sa technologie Bluetooth¹
(distance non obstruée)



Temps de démarrage rapide de 60 minutes tous les 14 jours
pour passer plus de temps en boucle semi-fermée¹⁻³




Reconnexion ultrarapide en 30 secondes
en cas de perte de signal¹



Aucune perte de données
même en cas de perte de signal
14 jours de données stockées
dans le capteur¹, soit 100%
du profil glycémique



FreeStyle Libre 3, connecté avec mylife CamAPS FX

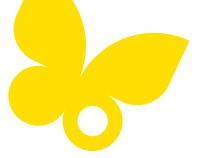

Comment vérifier facilement en 4 étapes
que votre smartphone est compatible ?


1. Quel est le modèle de téléphone de votre patient et la version de son système d'exploitation (OS) ?



iPhone




Touchez l'icône Réglages
sur l'écran d'accueil
(ou dans la bibliothèque
d'apps).

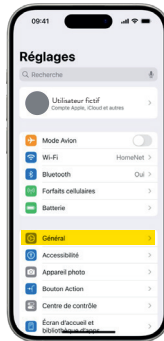

Aller dans
« Général »




Aller dans
« Information »

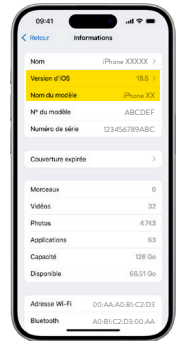


Android



Touchez l'icône
paramètres

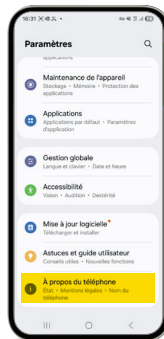

Aller dans
« À propos
du téléphone »

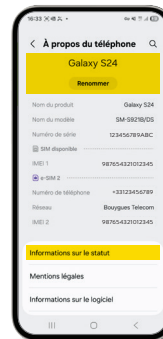

Aller dans
« Informations
sur le statut »



2. Vérifier que le modèle de téléphone et celui de l'OS sont compatibles avec FreeStyle Libre 3

La liste des téléphones et OS compatibles¹ avec FreeStyle Libre 3 est disponible :

» En scannant
ce QR Code :



» Ou en se rendant à l'adresse :
<https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/fr.html>



Dans le tableau « *FreeStyle Libre 3 continous glucose monitoring system* », cliquer sur l'icône pdf « *Mobile Device & OS Compatibility* » pour accéder à la liste.

Il est nécessaire que le téléphone ET l'OS soient compatibles pour installer mylife CamAPS FX avec FreeStyle Libre 3.

Téléphone	Système d'exploitation	Compatibilité
		
		
		



Avec un téléphone reconditionné, le remplacement de certaines pièces peut affecter la compatibilité avec FreeStyle Libre 3.

1. Cette liste contient uniquement les téléphones testés.
Images et données utilisées uniquement à des fins d'illustration. Il ne s'agit ni de vrais patients, ni de vraies données.

3. Télécharger l'application mylife CamAPS FX

NOUVEAU

L'application
mylife CamAPS FX
est disponible
sur Google play
ou l'App Store.




4. Paramètres à vérifier avant et pendant l'installation¹

- Vérifier que le NFC et le Bluetooth soient activés
- Lors du paramétrage de mylife CamAPS FX, autoriser :
 - ✓ La localisation
 - ✓ Photos, vidéos, fichiers musicaux/audio
 - ✓ Détecter les appareils à proximité
 - ✓ Arrêter l'optimisation de la batterie



¹ Compatible avec les systèmes d'exploitation iOS 17 et plus.

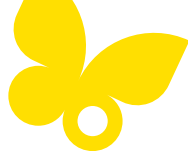

Les services Abbott à votre disposition

Service Clients



Pour toute questions sur FreeStyle Libre 3, la garantie et le remplacement des capteurs, contactez le Service Clients Abbott¹ au numéro vert :

0 800 10 11 56

Service & appel
gratuits^{**}

#EasyToCollect



Les capteurs usagés de la gamme FreeStyle Libre peuvent reprendre vie dans d'autres produits avec le geste **#EasyToCollect**.^{*2,3}

Collecte de 26 capteurs usagés pendant 1 an dans une enveloppe préaffranchie et gratuite.

* EasyToCollect signifie Facile à collecter.

1. Le Service Clients est disponible du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 au 0 800 10 11 56 (service et appel gratuit, y compris depuis un mobile). L'accès au numéro vert depuis l'étranger, et les DROM COM peut être limité par certains opérateurs dans ce cas vous pouvez nous appeler au 01 45 60 34 34. Cette communication pouvant être facturée (cela dépend de votre opérateur et de votre abonnement téléphonique), nous vous recommandons de contacter votre opérateur téléphonique avant d'appeler ce numéro. 2. 98% des métaux recyclés et pour tous les modèles de capteurs Abbott. Étude ACV réalisée par WeLOOP. 3. JOFR n°0298 du 24 décembre 2023.

FreeStyle Libre 3



Consultez
les informations produits
en flashant ce QR Code

Document promotionnel à destination des professionnels de santé.
Images et données utilisées uniquement à des fins d'illustration. Il ne s'agit pas de vrais patients, ni de vraies données.

FreeStyle Libre 3 est autorisé à fonctionner avec le système d'administration automatisé d'insuline mylife Loop, incluant l'application mylife CamAPS FX et la pompe à insuline mylife Ypsopump. mylife et Ypsopump sont des marques déposées d'Ypsomed AG. CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd.

© 2026 Abbott. Tous droits réservés. Libre, le logo du papillon, la forme et l'apparence du capteur, la couleur jaune, et les marques et/ou designs associés sont la propriété intellectuelle du groupe de sociétés Abbott dans différents territoires. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. PDS-ADC-128027 v2 02/26.
Abbott France S.A.S. 40/48 rue d'Arcueil CP 10457 94593 Rungis Cedex France. 602 950 206 RCS Créteil.



life. to the fullest.®

Abbott